

TRANSPARENCIA DE TALLAS PARA TAPONES DE OÍDO DOC'S PROPLUGS®

9,5 cm

Instrucciones de medición para Doc's Proplugs

1. Colocarse frente a un espejo
2. Poner esta plantilla contra su oído
3. Llevar a cabo la medición con cada uno de los tamaños muestra sobre su aurícula hasta encontrar el tamaño correcto (fig.1)
4. Elegir el tamaño del tapón que cubra por completo su aurícula (fig.2)

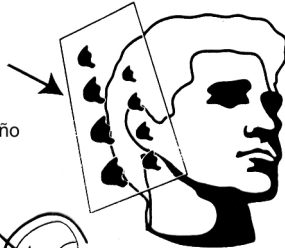


Figura 1



Figura 2



TINY




X SMALL



MEDIUM SMALL




SMALL

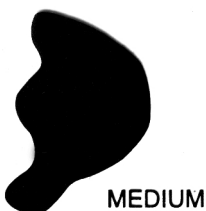


MEDIUM



LARGE

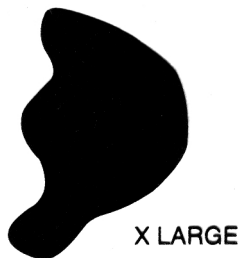

X LARGE

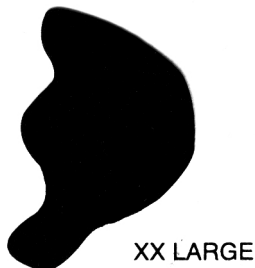

XX LARGE

Imprime este archivo en una hoja de papel o transparencia de tamaño carta.

NO ESCALES

Selecciona Escalar página: NO antes de imprimir.

No encojas el área de impresión.

Mide los lados para asegurarte que se imprimió correctamente.

Pide asistencia para que te ayuden a medir tu oreja derecha con las siluetas de tallas. Esto permitirá hacerte una mejor idea de la talla que necesitas comprar.

21,6 cm